

WAM



LOSER & CO
Zawsze coś dobrego...



WAMkey

... by bezpiecznie zdjąć!

Wyeliminuj ryzyko

Dotychczasowe metody zdejmowania prac protetycznych powodowały ryzyko uszkodzenia aparatu zawieszeniowego zęba i/lub zniszczenie uzupełnienia. Tak więc niezależnie od okresu użytkowania nie można jej było powtórnie wykorzystać.


WAMkey działa atraumatycznie

Wamkey to zestaw dźwigni opracowanych do szybkiego i atraumatycznego zdejmowania koron i mostów.


Absolutnie bezpieczne i nieinwazyjne zdjęcie pracy protetycznej umożliwia ponowne jej wykorzystywanie zarówno jako uzupełnienie tymczasowe jak i stałe.

WAMkey oddziela uzupełnienie w kierunku zgodnym z osią długą zęba. Siły działające na oszlifowany ząb, więzadła i koronę protetyczną zostają zredukowane do minimum, filar pozostaje nienaruszony.


Najbardziej istotne części pracy protetycznej: część przyszyjkowa, powierzchnia żująca oraz punkty styczne, zostają zachowane. Dla pacjenta cała procedura jest całkowicie bezbolesna i szybka ponieważ trwa 1-3 minut/punkt.

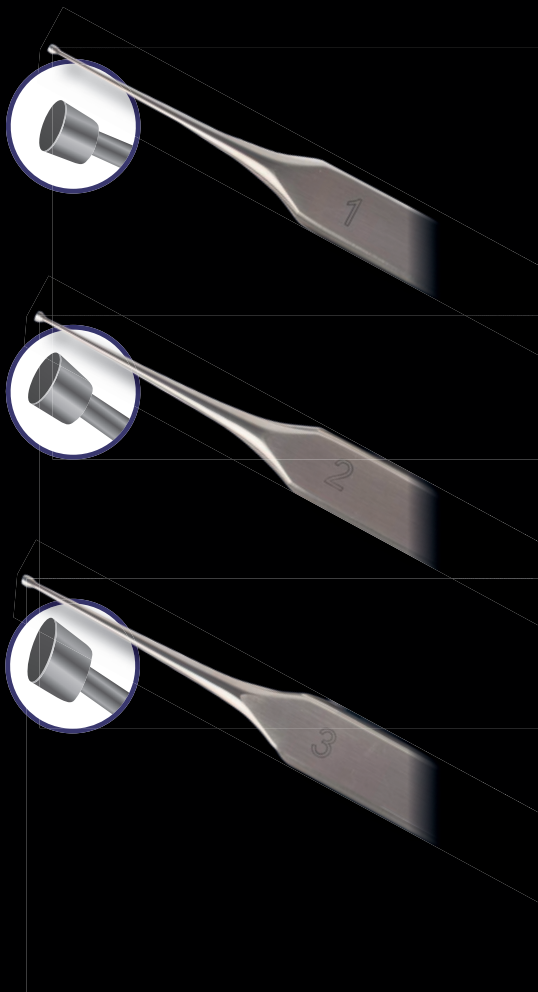


... tak zrobmy!

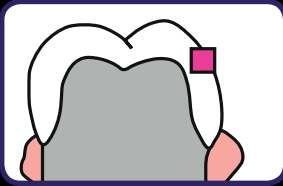


Wybierz najbardziej dogodny punkt wejścia w koronę. Celem jest dotarcie do środka filaru tuż pod wewnętrzną stroną korony protetycznej oraz określenie warstwy cementu.

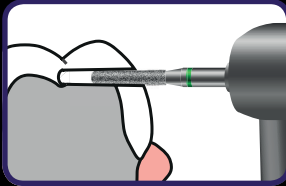


Nawierć wąski poziomy otwór kierując się po zębinie do środka powierzchni żującej lub siecznej.

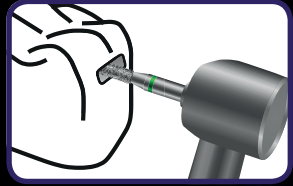

Poszerz otwór w płaszczyźnie poziomej aż do uzyskania prostokątnej tulei wejściowej.

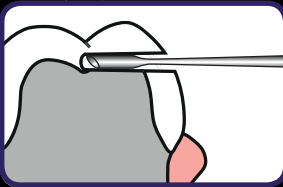

Wprowadź dźwignię nr 1 w szczelinę. Jeśli odległość pomiędzy filarem a koroną jest większa, należy dopasować otwór i szczelinę do dźwigni nr 2. Jeśli odległość nadal jest za duża, dopasujemy do dźwigni nr 3.

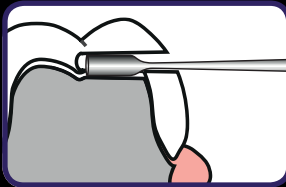

Wprowadzić wybraną dźwignię do środka korony i ostrożnie wykonując kilka półobrotów, doprowadzić do odcementowania pracy.

WAMkey
Intro-Kit

Zawartość: Zestaw 3 dźwigni (WK1-3),
3 wiertła do porcelany i metalu,
CD-ROM z instrukcją (filmy, animacje 3D)

Nr artykułu: WKP | Cena: 1.272 PLN

MD Guide

... by dobrze umiejscowić!




MD Guide to genialny w swej prostocie system lokalizacji implantu na wyrostku, uwzględniający szerokość oraz oś przyszłego uzupełnienia protetycznego.

MD Guide składa się z tulei pilotujących oraz tulei stabilizujących służących do zaplanowania takiej lokalizacji implantu, by nie napotkać na żadne problemy podczas wykonywania prac protetycznych. Tuleje MD Guide działają jak wirtualny ząb, stosuje się je jako prowadnice do wykonywania kolejnych otworów wiertłem pilotującym tak, by lokalizacja implantu była zaplanowana, równoległa i precyzyjna.

Tuleje MD Guide zarówno w systemie pilotującym jak i stabilizującym są zwymiarowane pod uzupełnienia protetyczne.

MD Guide zastępuje szablon implantologiczny.

MD Guide jest kompatybilny ze wszystkimi systemami implantologicznymi.

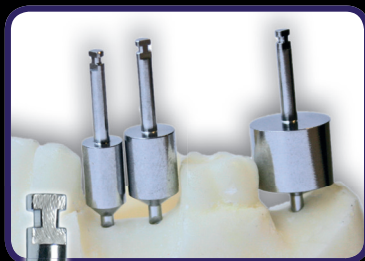


... tak zrobmy!



Wybrać wiertło pilotujące połączone z tuleją MD Guide, której szerokość odpowiada brakującemu zębowi, następnie wykonać wiercenie pilotowe na żądaną głębokość (punktem odniesienia jest cylinder). Jako prowadnicę wykorzystać sąsiedni ząb.



Usunąć tuleję pilotującą (z wiertłem) MD Guide i zastąpić ją tuleją stabilizującą MD Guide („wirtualnym zębem”) tej samej szerokości.

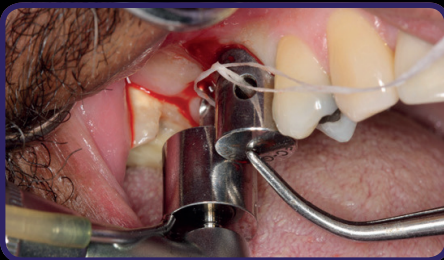

Wybrać kolejną tuleję pilotującą MD Guide o szerokości odpowiadającej następnemu brakującemu zębowi. Wcześniej zamocowana tuleja stabilizująca MD Guide posłuży jako prowadnica i punkt odniesienia podczas ustalania kolejnej lokalizacji implantu. Pracować do osiągnięcia żądanej głębokości (punktem odniesienia jest cylinder).



Oba otwory pilotujące są dokładnie wykonane i idealnie odpowiadają pozycji brakujących zębów. W celu potwierdzenia równoległości można wykonać zdjęcie rentgenowskie.

MD Guide
Intro-Kit

Zawartość: 5 tulei pilotujących (z wiertłami) MD Guide (różnej średnicy)
5 tulei stabilizujących MD Guide (różnej średnicy)
1 box do przechowywania i sterylizacji

Nr. artykułu: FCP | Cena: 2.586 PLN

WAM'X

... by szybko wyjąć!

Zapomnijcie o długotrwałych i skomplikowanych zabiegach!

Dzięki WAM'X wkłady koronowo-korzeniowe usuwa się banalnie łatwo i całkowicie bezpiecznie.


WAM'X wykorzystuje zasadę dźwigni i działając w kierunku osi zęba skutecznie oddziela zacementowaną część wkładu od korzenia. Ryzyko złamania i uszkodzenia korzenia podczas usuwania wkładów tą metodą zostało znacząco zminimalizowane.

WAM'X działa atraumatycznie


Końcówki dźwigni zapewniają niezakłóconą ruchomość nadbudowy i jej oddzielenie od kanału korzenia w kierunku najmniejszego oporu. Nacisk na korzeń i otaczającą go tkankę jest niewielki a procedura całkowicie bezbolesna i atraumatyczna dla aparatu zawieszeniowego zęba. Dzięki zastosowaniu trzech rozmiarów końcówek dźwigni, możliwy jest dostęp do każdego wkładu k-k, nawet w skrajnych zębach trzonowych.



... tak zrobmy!

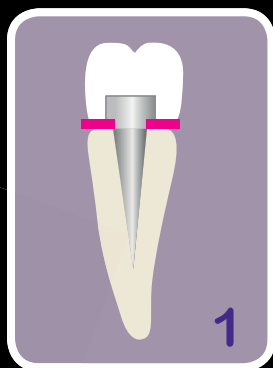


Wyfrezuj przestrzeń pomiędzy częścią nośną korzenia a częścią koronową uzupełnienia tak, by można było w nią wsunąć złożone ramiona dźwigni.

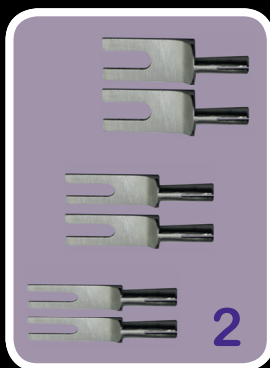

Wybierz odpowiedni na szerokość rozmiar ramion dźwigni.



W wyfrezowaną wcześniej szczelinę wsuń ramiona dźwigni.

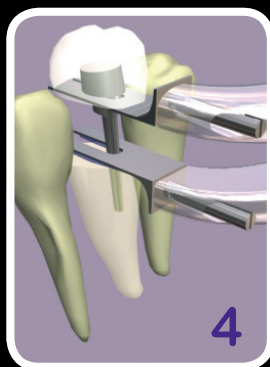

Powolnym ruchem zaciskaj dźwignię. Wkład wysunie się.

WAM'X
Intro-Kit

Zawartość: 1 dźwignia WAM'X.
3 rozmiary ramion i podkładek silikonowych
3 wiertła do ceramiki i metalu
CD-ROM z instrukcją obsługi (filmy, animacje 3D)

Nr artykułu: WXP | Cena: 2.808 PLN

Tweezers[®]

... by dobrze trzymać!

Classic Tweezers[®]

Dzięki tej skrzyżowanej pęsetcie zaciskowej można wszystko bezpiecznie podnieść. Pozostaje w biernej pozycji zamkniętej tak długo, jak jest to niezbędne i otwiera się dopiero po lekkim naciśnięciu na rączki. Podanie potrzebnego przedmiotu przez asystę jest łatwe i bezpieczne. Dzięki rowkowanej powierzchni uchwytu pęseta Classic Tweezers jest

uniwersalnym instrumentem chwytającym. Zastępuje konwencjonalną pęsetę i ułatwia trzymanie wielu różnych przedmiotów: kuleczek waty, klinów, nici retrakcyjnych, ćwieków itd.



Classic
Tweezers[®]

1 pęseta Classic Tweezers

Nr. artykułu: CT | Cena: 95 PLN

Endo Tweezers[®]

Rowki podłużne pęsety Endo Tweezers[®] ułatwiają pracę ze wszystkimi cylindrycznymi i podłużnymi przedmiotami. Szczególnie przydatne do przenoszenia i

trzymania gutaperki, papierków osuszających, ćwieków, klinów itp.



Endo
Tweezers[®]

1 pęseta Tweezers

Nr. artykułu: ET | Cena: 108 PLN

Geko Tweezers®

Dzięki Geko Tweezers® chwytanie i wstawianie koron, wkładów i nakładów staje się dziecinnie prostą zabawą. Blokujące pincety zaciskowe z miękkimi i żłobkowanymi nakładkami silikonowymi, nadającymi się do autoklawowania i znajdującymi się w zestawie pastami przenoszącymi Geko dbają o to, by uzupełnienia protetyczne trafiły precyzyjnie na swoje miejsce. Pasywny mechanizm zamykający zapobiega samowolnemu

otwarceniu się pincety. Ułatwia współpracę z asystą przy podawaniu uzupełnienia i oszczędza cenny czas. Geko Tweezers są cenną alternatywą dla konwencjonalnych pincet zwłaszcza w obszarze zębów tylnych lub u pacjentów z małym rozwarciem.



Geko Tweezers® Intro-Kit

Zawartość: 1 pinceta (do sterylizacji 135°C),
20 końcówek silikonowych (do sterylizacji 135°C),
1 strzykawka pasty przenoszącej Geko
Nr. artykułu: GEKT1 | Cena: 743 PLN

Geko Tweezers® Refills

Końcówki silikonowe Geko:
20 sztuk (szczególnie miękkich, (do sterylizacji 135°C)
Nr. artykułu: GEKEM20 | Cena: 131 PLN

Geko pasta:
1 strzykawka pasty przenoszącej (zawartość: 5 ml)
Nr. artykułu: GEKP5 | Cena: 131 PLN

Omnis


... do wielu misji!

Wielofunkcyjny i solidny instrument do usuwania zbędnych resztek cementu oraz do usuwania nawisów kompozytowych. Instrumenty Omnis 1 lub 2 są niezastąpione w wielu czynnościach i umożliwiają zastąpienie nimi innych wysokiej jakości i delikatnych instrumentów. Jeden służy do zdejmowania nadmiarów cementu lub kompozytu, drugiego można używać jako haków lub dźwigni do zdejmowania prowizoriów.

Instrumenty Omnis mają zastosowanie do:

- usuwania nadmiarów tymczasowego lub ostatecznego cementu,
- korygowania nawisów kompozytowych,
- modelowania kompozytu,
- usuwania koron tymczasowych

Instrumenty nadają się do sterylizacji 135°C.

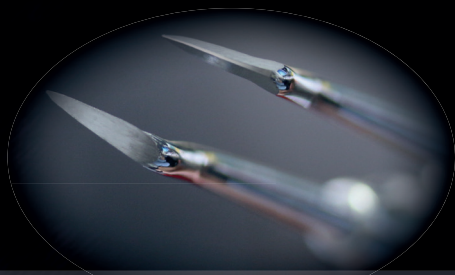

Omnis 1

Instrument z ostrzem do usuwania i przycinania nadmiarów

Nr. artykułu: OM1 | Cena: 114 PLN



Omnis 2

Instrument z ostrzem do podważania

Nr. artykułu: OM2 | Cena: 114 PLN



RAPTOR

... by skutecznie złapać!

Raptor to specjalne szczypce z wygiętymi, żłobkowanymi powierzchniami chwytными, ułatwiającymi zakładanie i zdejmowanie paska lub blaszek formówek częściowych, zwłaszcza z obszaru proksymalnego. Szczególnie przydatny gdy uzupełnienie przykleiło blaszkę formówki do zęba lub gdy punkt styczny znajduje się zbyt blisko. Wówczas przy pomocy Raptora chwyta się koniec matrycy i odciąga ją skutecznie i bezpiecznie od uzupełnionej powierzchni zęba.

Instrument nadaje się do sterylizacji 135°C.



RAPTOR

Zawartość: Raptor - szczypce specjalne

Nr. artykułu: RPT | Cena: 335 PLN

CERAMOMETALIVORE

... by łatwo przeciąć i oszlifować!

Wiertła CMV (ceramometalivore) równocześnie tną i metal i ceramikę. Te niezwykle instrumenty tnące nie narażają ceramiki i zapobiegają w większości przypadków jej odłamaniu.

Wysoce odporne, sterylizowalne

Wiertła CMV wykonane są z materiału w jednym kawałku. Tną skutecznie i bezpiecznie. Za pomocą jednego instrumentu można przeciąć kilka uzupełnień. Do sterylizacji 135°C.

Oszczędzają końcówki stomatologiczne.

Dzięki temu, że część robocza płynnie przechodzi w trzonek, frez jest ustawiony zupełnie osiowo. Pracuje praktycznie bez wibracji i dlatego może ciąć bardzo dokładnie. Nadaje się do zastosowania w turbinach i końcówkach przyspieszających.




	Wersja	Nr art.	Długość części roboczej	Zastosowanie	Zawartość	Cena/opak.
	Standard	FR-CMV25	4 mm / 19 mm	Do większości prac frezowych.	25 szt.	549 PLN
	Ultra	FR-CMVU5	8 mm / 22 mm	Do dłuższych i głębszych wierceń, szlifowania pod korony.	5 szt.	195 PLN



ZirCator

... by pokonać cyrkon!

Skuteczny instrument umożliwiający łatwe cięcie koron cyrkonowych.

Dzięki swojej innowacyjnej, opatentowanej technologii ZirCator tnie cyrkon z wysoką skutecznością i bezpieczeństwem.

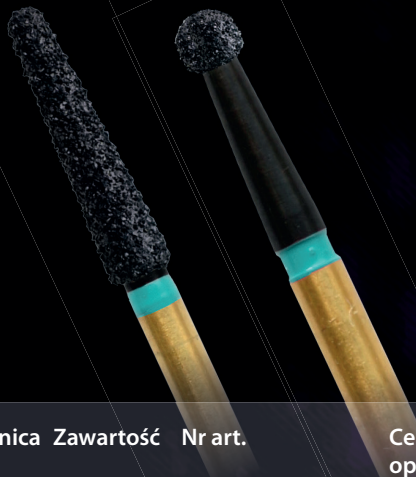

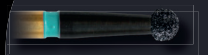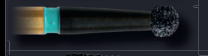Wersja	Ziarnistość	Średnica	Zawartość	Nr art.	Cena/ opak.
	Kulka	średnia	18	4 szt., FR-ZIRCBL18M-4	240 PLN
	Kulka	średnia	18	20 szt., FR-ZIRCBL18M-20	1.049 PLN
	Stożek	średnia	18	4 szt., FR-ZIRCCC18M-4	240 PLN
	Stożek	średnia	18	20 szt., FR-ZIRCCC18M-20	1.049 PLN

ZAMÓWIENIE TEL NR. 608 550 333

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
WKP	WAMkey Intro Kit , zawartość: Zestaw 3 dźwigni (WK1-3), 3 wiertła do porcelany i metalu, CD-ROM z instrukcją (filmy, animacje 3D)	1.272 PLN	
WK1	Dźwignia WAMkey nr. 1	478 PLN	
WK2	Dźwignia WAMkey nr. 2	478 PLN	
WK3	Dźwignia WAMkey nr. 3	478 PLN	

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
FCP	MD Guide Intro Kit , zawartość: 5 tulei pilotujących MD Guide (różnej średnicy), 5 tulei stabilizujących MD Guide (różnej średnicy), 1 box do przechowywania i sterylizacji	2.586 PLN	

Tuleje pilotujące MD Guide (z wiertłem)

FC-GF__	ø 6,0	ø 7,5	ø 9,0	ø 10,5	ø 12,5	Cena/paczka
Ilość:						370 PLN

Tuleje stabilizujące MD Guide

FC-GNF__	ø 6,0	ø 7,5	ø 9,0	ø 10,5	ø 12,5	Cena/paczka
Ilość						142 PLN

BTCHIR608060	Kaseta chirurgiczna (na 15 tulei MD Guide) <i>sterylizacja 135 °C</i>	313 PLN	
--------------	---	---------	--

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
WXP	WAM'X Intro Kit , zawartość: Dźwignia WAM'X, 3 rozmiary ramion i tarcz silikonowych, 3 wiertła do ceramiki i metalowe, CD-ROM z instrukcją obsługi (filmy, animacje 3D)	2.808 PLN	
WXE1	Ramiona dźwigni WAM'X małe	98 PLN	
WXE2	Ramiona dźwigni WAM'X średnie	98 PLN	
WXE3	Ramiona dźwigni WAM'X duże	98 PLN	
WXR6	Podkładki silikonowe do WAM'X asortyment	90 PLN	

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
CT	Classic Tweezer , pinceta uniwersalna	95 PLN	
ET	Endo Tweezer , pinceta endodontyczna	108 PLN	

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
GEKT1	GEKO Intro Kit , zawartość: Pinceta, 20 silikonowych nakładek, pasta GEKO	743 PLN	
GEKEM20	GEKO-nakładki silikonowe (20 sztuk)	131 PLN	
GEKP5	GEKO pasta, strzykawka (5 ml)	131 PLN	

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
OM1	Omnis N°1 - nadmiary, modelowanie, przycinanie	114 PLN	
OM2	Omnis N°2 - nadmiary, modelowanie, podważanie	114 PLN	

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
RPT	Raptor , szczypce specjalne	335 PLN	

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
FR-CMV25	Wiertła do porcelany i metalu , standardowe (4 mm), 25 sztuk	549 PLN	
FR-CMVU5	Wiertła do porcelany i metalu , wersja ultra (8 mm), 5 sztuk	195 PLN	

Nr art.	Opis	Cena	Ilość
FR-ZIRCCC18M-4	ZirCator kulka , średnioziarnisty – ø 18 mm, zawartość: 4 sztuki	240 PLN	
FR-ZIRCCC18M-20	ZirCator kulka , średnioziarnisty – ø 18 mm, zawartość: 20 sztuk	1.049 PLN	
FR-ZIRCB18M-4	ZirCator stożek , średnioziarnisty – ø 18 mm, zawartość: 4 sztuki	240 PLN	
FR-ZIRCB18M-20	ZirCator stożek , średnioziarnisty – ø 18 mm, zawartość: 20 sztuk	1.049 PLN	

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i obowiązują do 31.12.2017. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian cen i nie odpowiada za pomyłki drukarskie. Przy zakupach obowiązują ogólne warunki handlowe dystrybutora.

Pieczętka/dane kontaktowe:

Dystrybucja:

LOSER & CO
Zawsze coś dobrego...



LOSER & CO
Zawsze coś dobrego...



LOSER & CO GMBH

PRZEDSTAWICIEL POLSKA: MAŁGORZATA RUSEK • TEL 608 550 333 • MRUSEK@LOSER.DE

TEL.: +49 21 71/70 66 70 • FAX: +49 21 71/70 66 66

www.loser.de